

1. ENVOI DU MATERIEL

Suite à votre commande, LACTEUS vous expédie, par voie postale, le matériel nécessaire pour réaliser les prélèvements (des tubes EDTA, des aiguilles, un porte tube, des kits de gestation, une facture et un mode opératoire).

2. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

2.1. Précautions à prendre


- Ne prélever que les vaches inséminées il y a plus de 28 jours, et vêlées de plus de 70 jours.
- Tous les échantillons et dispositifs doivent être portés à 15-30 °C avant de réaliser le test.

2.2. Prélèvement


- Placer l'autotest sur une surface propre et plane.
- Noter le numéro de l'échantillon (n° de vache à tester) sur le dispositif du test.
- Garder la solution de lavage à usage unique et la pipette à côté du dispositif.
- Scanner le QR code ci-dessous pour voir la vidéo du test de gestation dans le sang.




- Prélever du sang à la queue de la vache puis retourner le tube plusieurs fois.

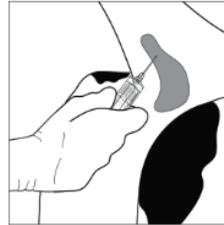


- Presser l'ampoule supérieure de la pipette pour aspirer le prélèvement, en trempant la pipette dans le tube de sang.

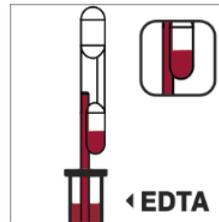

- Distribuer l'échantillon dans le puit du dispositif en pressant l'ampoule supérieure.

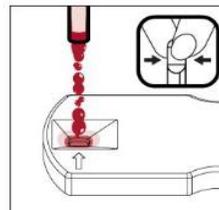


- Ajouter 6 gouttes de la solution de lavage dans les 2 minutes suivant l'ajout de l'échantillon.

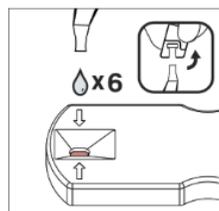


3. LECTURE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats sont lisibles au bout de 20 minutes et peuvent être lus jusqu'à 50 minutes après l'ajout de la solution de lavage. Au-delà, les résultats ne sont plus valides.


- La présence d'une ligne de test « T » rouge ou rose indique que la vache est **gestante**.

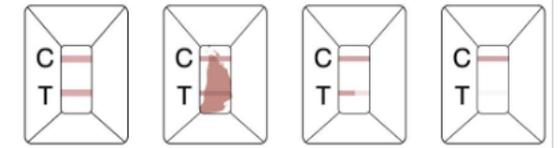

- L'absence de ligne « T » indique que la vache est **non gestante**.

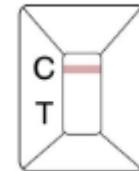

- Le test n'est pas valide si aucune ligne de contrôle « C » n'apparaît.

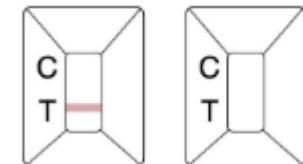

POUR S'APPROVISIONNER : Rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site internet www.lacteus.fr puis de nous contacter pour commander notre kit



5.60€ HT

l'analyse

AVANTAGES DU TEST

- ✓ Identification des vaches non gestantes en quelques minutes
- ✓ Lecture facile des résultats en vue de prendre des décisions rapidement
- ✓ Obtention immédiate de résultats fiables



Test de gestation dans le sang



Génisses inséminées depuis plus de 28 jours